

シールドフレームの 消毒・梱包手順



準備するもの

- マスク 次亜塩素酸ナトリウム (キッチンハイター・キッチンブリーチ・ミルトン)
- 消毒用の容器 プラスチック製のトング 空の500mlペットボトル
- ドライヤー ポリ袋(45L) or ラップ キッチンペーパー or ティッシュ
- 使い捨て手袋 梱包用：フリーザーバック or ポリ袋 シールドフレーム(3Dプリント品)

1. 消毒液の準備

- ① 手を洗い、マスクを装着します。
- ② 空のペットボトルに**0.1%の次亜塩素酸ナトリウム消毒液**を作ります。

※消毒液の濃度により分量が異なりますが、キッチンハイターの場合ペットボトルのキャップ2杯(10ml)に500mlペットボトルいっぱい分量が0.1%の次亜塩素酸消毒液を作ることができます。時間経過と共に薄まりますので、作り置きせず、都度作成してください。

- マスク 次亜塩素酸ナトリウム
- 空の500mlペットボトル

2. 3Dプリント品の確認

- ① 破損やとげがないかを確認します。
- ② 汚れがある場合は、水または中世洗剤で洗い流します。

- シールドフレーム(3Dプリント品)

3. 消毒液に浸ける

- ① 消毒用の容器に、1で作成した消毒液を入れます。(後に、消毒液を使用するので30ml程度は残しておいてください)
- ② シールドフレーム、プラスチック製のトングをつけます**30分以上**浸けます。

30分後

- 消毒用の容器
- 1で作った次亜塩素酸ナトリウム消毒液
- プラスチック製のトング
- シールドフレーム

4. 清潔エリアの確保

- ① 手を洗い、マスクを装着します。
- ② 広めのテーブルなどに、ポリ袋を切ったものを内側を上にして敷きます。(もしくは、ラップをはる)
- ③ 使い捨ての手袋を装着する。
- ④ 1で準備した次亜塩素酸消毒液の残りをキッチンペーパーもしくはティッシュに含ませ、2度拭きし、乾かす。

- マスク
- 使い捨て手袋
- 1で作った次亜塩素酸ナトリウム消毒液
- キッチンペーパー or ティッシュ

5. 消毒液から取り出す

- ① トングを用いて、シールドフレームを取り出し、水で軽くながします。
- ② 清潔エリアにシールドフレームを並べます。
- ③ ドライヤーを用いて、シールドフレーム、トングを乾燥させます。

- シールドフレーム
- プラスチック製のトング
- ドライヤー

6. 梱包する

- ① トングを用いて、梱包用のフリーザーバック、ポリ袋に入れます。この際、袋の中を手で触らないようにします。
- ② 袋をしめて、梱包終了です。

- シールドフレーム
- プラスチック製のトング
- 梱包用：フリーザーバック or ポリ袋